導入施設様の声

グループホームA様(埼玉県) 介護記録への入力が楽になりました

夜間トイレに行った回数や睡眠状態が見れるので投 薬の参考にしたり眠剤を使うかの判断に役立ちます。 何より介護記録に睡眠やトイレ回数などを入力する 時にとても便利です。

グループホームC様(千葉県)

入居者の状況が把握できてスタッフの負担が軽減

以前は寝返りなどでシートセンサーが頻繁に鳴り 毎晩スタッフが数十回も確認のため居室に行くこと が課題でした。これで感染防止対策としても不要な 接触を減らすことができるようになり安心です。

音声・画面での通知機能一覧(要介護者様ごとに合わせて「有効/無効」の設定が自由にできます。)

設定状態	センサー設置場所	状態表示	タグ 装着	音声 通知	PC画面 表示	スマホ 表示	音声通知内容	備考
初期設定	居室	起床	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	"OOさんが起床しました。"♪~	 ・水平から設定角度以上で通知 ・3秒以内に発声・発声後3分間発声せず
初期設定	居室	動き	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	"OOさんが動きました。"♪~	・水平、寝返りで発声
初期設定	玄関	危険場所立入り	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	"OOさんが玄関に立入りました。"♪~	・侵入アラート
初期設定	全センサー	ロスト(タグ所在不明)	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	"00さんのタグがロストです。"♪~	・タグの電池切れ ・タグの洗濯
初期設定	トイレ	トイレ 長時間	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	"〇〇さんがトイレで10分経過しました。"♪~	・トイレ滞在10分超で発声 ・時間設定可能
任意設定	トイレ	トイレ入り	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	"△△のトイレは〇〇さんです。"♪~	・15秒以内にタグ装着者の 人物特定し発声
任意設定	居室	侵入	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	"OOさんが△△の部屋です。"♪~	・徘徊される方にタグを装着
任意設定	居室	スタッフ対応	\bigcirc	\bigcirc	×	×	"OOさんのお部屋で対応中です。"♪~	・スタッフ用タグ(夜間時など) ・設定エリアのみ反応・履歴に記録

機器構成(受信機・センサー・中継装置)



●各種受信機



リビング・食堂・玄関・

危険場所用

※仕様変更によりシステムや機器が変更になる場合があります。

お問い合わせはこちら

光和ネットサービス株式会社 埼玉県戸田市喜沢1-28-15 KOWA NET本社ビル TEL 048-446-7780 https://kowa-ns.co.jp ボイスケア公式紹介サイト https://voice-care.jp 取り扱い店

「令和2年度第3次補正事業再構築補助金により作成」

グループホームB様(千葉県) スマホの音声で知らせてくれるので便利

スマホをポケットに入れておけば他の作業をしていて も「○○さんが起床しました♪」と音声でわかるので 画面を見ることなくすぐ駆けつける事ができ業務に集 中できます。

グループホームD様(埼玉県) パソコンが不慣れなスタッフでも簡単に使える

機器を操作する必要がなく音声通知で「〇〇さんが ○○○♪」とタグを付けた方の名前と状況を通知して くれるので、スマホを見る必要もなく1人夜勤の際に 一番効果を発揮してくれます。

※仕様変更により音声通知内容等が 変更になる場合があります。















音声で見守り

״→施設全体くまなく見える ▶ 大和江政 前田芳治 要介護者様の睡眠状態・

			2022年 根本	
更新	履歴	前6H	2022年 起床 06月27日(月) 次6H 国家	要介護者様
	部屋	氏名	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1	よくわかる。
	109	後藤		
		動線解析->		特に夜間の
	100	水野谷		
		動線解析->		改善できま
	102	武井		
		動線解析->		
	101	関		
		動線解析->		
	103			

